

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 20384

**DETERGENTE DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO PER
SUPERFICI, VIRUCIDA, BATTERICIDA, FUNGICIDA.**

Composizione

Principio attivo: 6,93 g di Cloruro di didecildimetilammonio (CAS n. 7173-51-5).
Eccipienti: Tensioattivo non ionico, agente chelante, Sali alcalini, acqua q.b.a g 100

Applicazione

Sanità (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori), **Igiene pubblica** (impianti sportivi, centri benessere, scuole) **Industria alimentare** (laboratori di produzione, macellerie e salumifici, industria dolciaria, panetterie, industrie di lavorazione di carne, pesce e verdure), **piccola e grande ristorazione** (ristoranti, bar, hotel, gastronomia, gelaterie, banchi vendita).

Modalità d'uso e diluizione:

Per un'azione **battericida** e **fungicida** applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una diluizione di concentrato di 40 ml per litro d'acqua e lasciar agire per almeno 15 minuti. Per assicurare un'efficacia **virucida** del prodotto lasciare agire almeno 30 min. Sciacquare con acqua. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati. Il rispetto delle diluizioni specificate ne assicura l'alta efficacia. Incompatibile con saponi e tensioattivi anionici.
Utilizzo come detergente igienizzante: Il prodotto può essere utilizzato come detergente igienizzante alla concentrazione di 20 ml per litro d'acqua.

Articolo	Codice	Confezione
Ice 113 Sept	3-1-45-5	Tanica da 5L in scatola da 4 pz

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie