

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19430

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO A BASE DI SALI QUATERNARI DI AMMONIO E FENOLI

Composizione

100 ml di soluzione contengono:	
Didecil-dimetil-ammonio cloruro	10,0 g
O-fenil-fenolo	1,5 g
Coformulanti:	
alcoli grassi etossilati	2,5 g
sequestranti, colore, profumo, acqua depurata	q.b. a 100 g

Caratteristiche

LH GAMMA PLUS è un disinfettante ad ampio spettro d'azione, attivo a freddo sia su Gram positivi sia su Gram negativi, acido-resistenti e micobatteri. Attivo inoltre contro i virus, anche su quelli lipofili, gruppo al quale appartengono l'HIV, l'HBV, l'HCV ed altri. L'azione microbocida dell'associazione dei due principi attivi è stata sperimentalmente dimostrata (Istituto di Microbiologia dell'Università di Messina). LH GAMMA PLUS ha caratteristiche peculiari date dall'associazione di due diversi principi attivi, che determina un'azione sinergica sulla parete cellulare e sulla membrana dei microrganismi, con conseguente perdita di proteine della componente strutturale del peptidoglicano ed alterazione della permeabilità della parete cellulare stessa. L'azione del prodotto si esplica anche su diversi sistemi enzimatici all'interno della cellula microbica, azione che porta ad un grado di denaturazione proteica che conduce alla lisi cellulare. Nei virus lipofili ed intermedi, il meccanismo d'azione è sostanzialmente simile con danneggiamento dell'involucro lipidico e della frazione proteica del nucleocapside, raggiungendo i costituenti interni.

Campi di impiego

LH GAMMA PLUS è utilizzabile per programmi di igiene e pulizia di pavimenti, superfici dure, infissi, strumentazioni ed attrezzature sanitarie e ambulatoriali, disinfezione di servizi igienici, protezione contro fermentazioni, muffe, infezioni, in ambienti, depositi, armadi, Disinfezione di rifiuti solidi speciali destinati alla termodistruzione.

Dosi d'impiego e consigli di utilizzo

- Disinfezione, lavaggio e deodorazione di pavimenti, infissi, superfici dure in genere: Concentrazione d'uso: 5% - Modo d'uso: trattare con spugne o spazzole, senza risciacquare. Sostituire la soluzione ogni 24 ore.
- Decontaminazione di emergenza di strumentazioni, attrezzature sanitarie, ambulatoriali, stoviglie particolarmente inquinate: Concentrazione d'uso: 5%. Tempo di immersione: 15 minuti. Modo d'uso: immergere fino a completa copertura con la soluzione del prodotto. Sostituire la soluzione ogni 24 ore.
- Disinfezione di servizi igienici Concentrazione d'uso: 5%. Tempo di contatto: 15 minuti.

- Disinfezione di rifiuti solidi speciali destinati alla termodistruzione. Concentrazione d'uso: 10,0%. Raccogliere il materiale organico nella soluzione diluita e lasciare a contatto per 15 minuti prima di avviare alla termodistruzione.
- Protezione contro fermentazioni, muffe, infezioni, in ambienti, depositi, armadi. Concentrazione d'uso: 10%.
- Lavaggio a macchina di biancheria infetta e sospetta: Concentrazione d'uso: 2,5%.

Articolo	Codice	Confezione
LH Gamma Plus	3-1-LH0010	Flacone da 1 litro in scatole da 12 pz

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie